

検査待ち無し!! その場で確認!!

※ 口腔液/唾液を採取して約15分で検出・確認できます。

COVID19 ANTIGEN RAPID TEST DEVICE 抗原検査ペン

ロット:120個

ロット:1,080個

ロット:3,000個

970円(税別) 920円(税別) 790円(税別)

※ロット割れ不可

新型コロナウイルスが 存在するかを判定

口腔液/唾液を採取して 約15分で検出

※1 本検査キットは、判定ラインの発色を視覚的に解釈することにより、SARS-CoV-2 ウイルスを検出します。

※2 検出対象物の量、検査実施環境によっては検出できない可能性があります。※感染の有無については専門の病院等にご相談ください。本検査キットで判断することはできません。

精度:99.4%以上

変異株対応

※3 当社PCR検査との比較実験(陽性50検体:陰性50検体)では、陽性陰性一致率100%。実験の方法・結果は医師の確認・証明を受けています。(あくまで実験結果であり、臨床的な有用性は確認できておりません。診断等に用いしないでください。)

※4 現時点において、N501Y・L452Rの変異株の検出が可能であることについては確認しております。

本検査キットを使用して
検出ありの方は、無料で
PCR検査を致します。

東亜産業 PCR総合検査センター
24時間365日、日本全国どこでも
すぐお届け回収!!



詳しくはこちら▶



品名: 新型コロナウイルス
抗原検査ペン型デバイス

■キット内容物

- ・試験紙付き唾液コレクター×1
- ・抽出パuffア×1
- ・乾燥剤×1
- ・使用説明書×1

(本体サイズ) (約)H150×W21×D21mm

(仕 様) 判定時間: 15分

保管温度: 室温(2-30°C)

(検出精度) 精度: 99.4%以上※

当社PCR検査との比較実験(陽性50検体:陰性50検体)では、陽性陰性一致率100%。実験の方法・結果は医師の確認・証明を受けています。(あくまで実験結果であり、臨床的な有用性は確認できておりません。診断等に用いしないでください。)

(使用期限) 製造より2年

(入 数) 120個入(60×2)

※ロット割れ不可

(型 番) TOA-CAR-TS

(J A N) 4562441909374

ご注意●飲食・歯磨き・うがい直後の唾液採取は避けてください。●開封後はすぐにご使用ください。●緩衝液が皮膚に付着した場合はよく洗い流してください。●使用後のテストペンは引き抜かず廃棄してください。●本品は分解しないでください。

研究用 日本製

検査1回分 MADE IN JAPAN

Designed by TOA Industry co., Ltd. in Japan.



(販売用 パッケージ吊下げタイプ)

(アルミ包装袋)

サイズ: 約W12.5×23.5cm

※画像はイメージです。一部仕様が変更になる場合がございます。

【使用目的】本品は研究用試薬です。この製品で得られた結果の臨床的有用性については確立されていないため、診断(感染しているかどうかの判断)等の目的では使用しないでください。新型コロナウイルス抗原検査ペン型デバイス(以後、本品)はイムノクロマト法による抗原検出試薬です。検体に含まれるSARS-CoV-2 のスプレシオカプシド蛋白質抗原の定性検出の判断を行います。この検査の結果は診断等の判断の材料に用いることはできません。本品で反応がある場合は、かかりつけ医又は地域のルールに従い、発熱相談窓口等にご相談ください。なお、本品で反応がなかったとしても、SARS-CoV-2感染を否定するものではありません。【ご注意事項】●本品は研究用としての使用に限定されます。●本品は使用の前までパuffから開封しないでください。●使用期限を過ぎた製品を使用しないでください。●パuffが破損していたり、開いていたりした場合は使用しないでください。●検査デバイスは使い捨てです。●緩衝液は防腐剤(0.09%のアジ化ナトリウム)を含みます。皮膚や目に触れた場合は十分量的の水で洗い流してください。●アジ化ナトリウムを含む溶液は鉛や銅に対して爆発的に反応する可能性があります。廃棄の際は大量の水を使用してください。●各テストを実行する際、検体を取り扱う際は適切な防護用具や手袋を使用するなどバイオハザード対策を講じてください。●検体の採取と処理は手順に従う必要があります。使用説明書通りの手順を行わないと結果が不正確になる可能性があります。●正確な結果を得るためには目視できるほどの血の混じった検体や過度に粘性のある検体を使用しないでください。●SARS-CoV-2の検体を扱う際は常に実験室にて適切な安全手順に従う必要があります。使用されたデバイスは感染源となる可能性があります。地域の規制要件に従い、適切に取り扱い、廃棄をお願いいたします。●規定以外の温度での保管は結果に影響を及ぼす可能性があります。



Shikishimasangyo Co., Ltd.

敷島産業株式会社

URL www.shikishimasangyo.co.jp

【本社】

〒463-0026

愛知県名古屋守山区数田町913番地

TEL(052)798-9666 FAX(052)798-3687

E-mail:nagoya@shikishimasangyo.co.jp

【東京営業所】

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町2-35-12-301

TEL(03)3669-8700 FAX(03)3669-8701

E-mail:tokyo@shikishimasangyo.co.jp

【大阪営業所】

〒542-0086

大阪市中央区西心斎橋2-2-7 御堂筋ジュンアシタビル6B

TEL(06)6227-8215 FAX(06)6227-8216

E-mail:osaka@shikishimasangyo.co.jp